



Vegleiðing í at brúka ESWAB
09-04-2014

1. Opna ytra posan
2. Tak potipinninn úr (uttan at røra við, niðan fyri reyða merkið)
3. Pota við pinninum har sum dyrkast skal frá
4. Skrúva lokið av prøvaglasinum
5. Stik potipinnin niður á botn í glasinum
6. Brót pinnin av um reyða merkið, við at benda hann um glaskantin.
7. Skrúva lokið væl aftur, so tað ikki lekur.
8. Set rekvisitiónsmerkið ella sjúklinga data á glasið

Eswab kan brúkast til allar vanligar podningar eins og Stuarts medium. Væta er í glasinum. Hendan vætan skal brúkast til dyrkanar kanningar. Vætan kann eisini brúkast til PCR kanning.

